



SV

BLEPHADERM

40 ml kräm

Vårdande och lugnande kräm för ögonlock och huden runt ögonen



Känslig, torr, irriterad & atopibenägen hud



Motverkar irritation & kliande hud



Oparfymrad & fri från konserveringsmedel

1. VAD ÄR BLEPHADERM?

BLEPHADERM 5-i-1 ögonkräm:

1. Lugnar
2. Återfuktar
3. Reparerar
4. Skyddar
5. Minskar svullnad

BLEPHADERM är en **vårdande kräm för ögonlock och huden runt ögonen**, som ger omedelbar lugnande effekt & långvarig återfuktning. Den minskar irritation (rodnad och svidande känsla), kliande hud och svullnad. Blephaderm är den första konserveringsmedelsfria, parfymfria och sterila ögonvårdsprodukten från Théa som är avsedd för känslig, torr, irriterad och atopibenägen hud.

BLEPHADERM ger omedelbar och varaktig behaglig känsla. Stärker hudbarriären och dess naturliga försvar för ett bättre skydd mot yttre faktorer. Hudens utseende förbättras: huden runt ögonen får en jämnare ton och påsarna under ögonen minskar i storlek och blir mindre framträdande.

ERKÄND EFFEKTIVITET I KONSUMENTSTUDIE¹

100 % av användarna upplevde att precis efter applicering minskade rodnad, irritation och kliande hud. Dessutom upplevde alla användarna att huden omedelbart blev lugnare, återfuktad, skyddad och kändes mer behaglig. Huden blev enligt 100 % av användarna mindre känslig redan efter första användningsdagen och 91 % angav att huden reparerades. 95 % ansåg att den vårdande krämen skyddade huden mot yttre faktorer.

Ingredienser

AQUA (VATTEN), OLEYL ERUCATE, TREHALOS, NATRIUMAKRYLATCOPOLYMER, LECITIN, JAPONICUS-ROTEXTRAKT, HYDROLYSERAD HYALURONSyra, MALTODEXTRIN, TOKOFEROL (e-vitamin), NATRIUMHYDROXID, FYTINSYRA, SOJABÖNSOLJA, HELIANTHUS ANNUUS FRÖOLJA.

2. VAD GÖR BLEPHADERMS FORMULERING OCH FÖRPACKNING INNOVATIV?

BLEPHADERM är en vårdande kräm som är innovativ och patenterad*. Den har utvecklats och testats av ögon- och hudläkare.

BLEPHADERM innehåller en nyskapande kombination av tre naturligt förekommande ingredienser:

- **Hyaluronsyra** som har återuppbyggande egenskaper och en vattenbindande förmåga som ger djup och varaktig återfuktning av huden.
- Det cellskyddande **trehalos** som reparerar och skyddar epidermis (det yttre hudlagret).
- **Rotextrakt från *Ophiopogon japonicus*** stärker hudbarriären, tar hänsyn till de naturliga mikroorganismer som lever på huden och bibehåller återfuktning.

BLEPHADERMs formulering drar fördel av Sterile Cosmetics™-teknologi som möjliggör en steril kräm fri från konserveringsmedel. Sterile Cosmetics™ är en innovation som kombinerar:

- Ett strikt urval av endast nödvändiga ingredienser för en säker och effektiv formulering
- En unik process inom dermokosmetik: sterilisering genom hela tillverkningskedjan (med fullständig sterilisering av tillverkningsutrustning, patenterad metod för att sterilisera formuleringen, packning i en steril miljö)

- Ett innovativt förslutningssystem: det så kallade D.E.F.I (Device for Exclusive Formula Integrity)-systemet, ett revolutionerande förhållningssätt till förpackningsdesign för dermokosmetika, som utvecklats och patenterats av Pierre Fabre. Det fullständigt lufttäta systemet hjälper till att bibehålla en helt steril formulering, genom att motverka kontaminering från bakterier och andra mikroorganismer, under tiden som produkten används.

*Patentansökan inskickad

3. VEM KAN ANVÄNDA BLEPHADERM?

BLEPHADERM är lämplig för alla hudtyper, speciellt för känslig, torr, irriterad och atopibenägen hud. **BLEPHADERM** är lämplig till känsliga ögon och för kontaktlinsanvändare.

BLEPHADERM är testad under dermatologisk- (hud) och oftalmologisk- (ögon) kontroll och har visat utmärkt tolerans.

4. SÅ HÄR ANVÄNDER DU BLEPHADERM

Tvätta ögonlocken med en produkt anpassad för ögonlocksrengöring, företrädesvis från Théas **BLEPHA**-sortiment, innan du använder **BLEPHADERM**.



Pumpa flera gånger tills krämen kommer ut innan första användning och vid andra tillfällen om behov finns.



Använd **BLEPHADERM** på ögonlock och huden runt ögonen morgon och kväll.



Steg 1: Applicera en liten mängd kräm på din fingertopp.



Nedre ögonlock



Övre ögonlock

Steg 2: Med hjälp av ditt finger applicerar du försiktigt krämen på huden runt ögonen och på ögonlocken. Applicera från den inre ögonvrån till den yttre på nedre och övre ögonlocket.



Nedre ögonlock



Övre ögonlock

Steg 3: Stryk eller dutta med lätt beröring försiktigt in krämen på ögonlocket från inre ögonvrån till yttre ögonvrån. Upprepa steg 1 till 3 på det andra ögat.



Steg 4: Torka av toppen på tuben efter varje användning och sätt tillbaka locket.

BLEPHADERM kan användas som en dagkräm på hela ansiktet. Behaglig konsistens på huden, inte klibbig och inte fet. Utmärkt som makeup-bas.

En tub **BLEPHADERM** räcker till cirka 200 appliceringar.

Applicera inte krämen direkt i ögat.

5. HUR SKA BLEPHADERM FÖRVARAS?

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Kassera tuben 2 månader efter första öppnandet.

Förvaras vid högst 30 °C.

Förvaras i skydd mot kyla, får inte frysas.

Skär inte i tuben (risk för kontaminering från bakterier).

Made in France

©2023, Laboratoires Théa. All rights reserved.

Théa®, **BLEPHADERM**® är registrerade varumärken som tillhör LABORATOIRES THEA.

¹ Användartest på 21 frivilliga. Nöjdhet i % efter 28 dagar.



Laboratoires Théa

12, rue Louis Blériot, 63100 Clermont-Ferrand, France



FI

BLEPHADERM

Voide, 40 ml

Silmäluumia ja silmänympäryksiä rauhoittava hoitovoide.



Herkälle, kuivalle, ärsyyntyneelle ja atopiaan taipuvalle iholle



Kutinaa ja ärsytystä lievittävä



Hajusteeton ja säilytysaineeton

1. MIKÄ ON BLEPHADERM?

BLEPHADERM 5-in-1-voide:

1. Rauhoittaa ihoa
2. Kosteuttaa
3. Korjaa
4. Suojaa
5. Vähentää turvotusta

BLEPHADERM on rauhoittava voide silmäluumille ja silmänympäryksille. Sillä on välitön rauhoittava ja pitkään kestävä kosteuttava vaikutus. Se vähentää ärsytystä (punoitusta ja pistelyä), kutinan tunnetta ja turvotusta. **BLEPHADERM** on Théan ensimmäinen säilytysaineeton, hajusteeton ja steriili silmänympärysvaivoide, joka on tarkoitettu herkälle, kuivalle, ärsyyntyneelle ja atopiaan taipuvalle iholle.

Iho tuntuu **BLEPHADERM**in käytön jälkeen miellyttävältä välittömästi ja pitkään. Tuote parantaa myös ihon suojakerrosta ja luonnollista puolustuskykyä ulkoisia tekijöitä vastaan.

Ihon ulkonäkö paranee. Silmänympärysiho tasoittuu ja silmäpussien ilmaantuvuus ja koko vähenevät.

KULUTTAJIEN TEHOKKAAKSI TOTEAMA*

Käyttäjien kokemus: punoitus, ärsytys ja kutinan tunne vähenevät heti käytön jälkeen 100 %:lla käyttäjistä. Tuote rauhoittaa, kosteuttaa ja suojaa ihoa välittömästi ja saa sen tuntumaan miellyttävämmältä (100 %). Ihon arkuus vähenee ensimmäisestä käyttöpäivästä alkaen 100 %:lla ja korjautuu 91 %:lla käyttäjistä. Hoitotuote suojaa ihoa ulkoisilta tekijöiltä (95 %).

Ainesosat

VESI, OLEYLYIERUKAATTI, TREHALOOSI, NATRIUMAKRYLAATTI, LESITIINI, OPHIOPOGON JAPONICUS -JUURIUUTE, HYDROLYSOITU HYALURONIHAPPO, MALTODEKSTRIINI, TOKOFEROLI, NATRIUMHYDROKSIDI, FYTIINIHAPPO, GLYSIINISOJAÖLJY, HELIANTHUS ANNUUS -SIEMENÖLJY.

2. MILLÄ TAVALLA BLEPHADERM-VOITEEN KOOSTUMUS JA PAKKAUS OVAT INNOVATIIVISIA?

Innovaatiivinen ja patentoitu * **BLEPHADERM**-voide on kehitetty ja testattu silmä- ja ihotautilääkärin valvonnassa.

BLEPHADERM-voiteen koostumuksessa on hyödynnetty innovatiivisesti luonnollisten ainesosien synergiaa:

- Ihoa uudistavien ominaisuuksiensa ja vedensitomiskykyä ansiosta **hyaluronihappo** mahdollistaa kudoksen syvän ja jatkuvan kosteutuksen.
- Biosuojaava **trehaloosi** korjaa ja suojaa orvaskettä.
- **Ophiopogon japonicus - juuriuute** parantaa ihon suojakerrosta, suojaa ihon mikrobiomia ja ylläpitää kosteutta.

BLEPHADERM-voiteen koostumuksessa on käytetty Sterile Cosmetics™ -teknologiaa, mikä mahdollistaa steriilin ja säilytysaineettoman voiteen. Sterile Cosmetics™ -innovaatio käsittää:

- ainesosien täsmällisen rajaamisen olennaisiin, mikä mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan koostumuksen
- ainutlaatuisen prosessin iho kosmetiikassa: kauttaaltaan steriilin valmistusprosessin (tuotantovälineistön täydellinen sterilointi, patentoitu menetelmä koostumusten

sterilointiin, pakkaaminen steriilissä ympäristössä)

- innovatiivisen sulkujärjestelmän: D.E.F.I (Device for Exclusive Formula Integrity) -järjestelmä on Pierre Fabren kehittämä ja patentoima vallankumouksellinen lähestymistapa ihon kosmetiikatuotteiden pakkaussuunnitteluun. Täysin ilmatiivis järjestelmä mahdollistaa steriilin koostumuksen estämällä bakteereja ja muita mikrobeja saastuttamasta sitä missään tuotteen elinkaaren vaiheessa.

*patenttia haettu

3. KENELLE BLEPHADERM-VOIDE SOPII?

BLEPHADERM sopii kaikille ihotyypeille ja erityisesti herkälle, kuivalle, ärsyyntyneelle ja atopiaan taipuvalle iholle. **BLEPHADERM** sopii herkille silmille ja piilolinssien käyttäjille.

BLEPHADERM on testattu ihotautilääkärin ja silmälääkärin valvonnassa, ja sen siedettävyys on osoittautunut erinomaiseksi.

4. MITEN BLEPHADERM-VOIDETTA KÄYTETÄÄN?

Puhdista iho ennen **BLEPHADERM**-voiteen käyttöä silmäluumien puhdistusaineella, mieluiten Théan **BLEPHA-** tuotesarjan valmisteella.



Paina pumpua ensimmäisellä käyttökerralla useita kertoja (tarvittaessa myöhemmilläkin käyttökertoilla), kunnes voidetta tulee ulos.



Käytä **BLEPHADERM**-voidetta aamuin ja illoin silmänympäryksille ja silmäluumille.



Vaihe 1: Ota pieni määrä tuotetta sormenpäähän.



Silmän alaluomi



Yläluomi

Vaihe 2: Levitä tuotetta hellävaraisesti pieni määrä silmien ympärille ja silmäluumille sormellasi. Tasoita silmän sisäkulmasta ulkokulmaa kohti.




Silmän alaluomi



Yläluomi

Vaihe 3: Taputtele hellävaraisesti silmäluumille silmän sisäkulmasta ulkokulmaa kohti edeten. Toista vaiheet 1-3 toiselle silmälle.

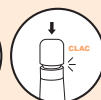

Vaihe 4: Pyyhi putken kärki jokaisen käyttökerran jälkeen ja aseta korkki paikalleen.

BLEPHADERM-voidetta voi käyttää päivittäin kaikkialle kasvoin. Sen koostumus tuntuu miellyttävältä iholla, se ei tahmaa eikä ole rasvainen. Erinomainen meikkipohja.

BLEPHADERM riittää noin 200 käyttökertaan.

Älä käytä suoraan silmiin.

5. MITEN BLEPHADERM-VOIDETTA SÄILYTETÄÄN?

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Hävitä putki 2 kuukauden kuluttua avaamisesta.

Säilytä alle 30 °C:ssa.

Älä säilytä jääkaapissa, älä pakasta.

Älä leikkaa putkea (bakteerisaastumisen riski).

Made in France

©2023, Laboratoires Théa. All rights reserved.

Théa® ja **BLEPHADERM**® ovat Laboratoires THEAn rekisteröityjä tavaramerkkejä.

¹ Testattu käytössä 21 vapaaehtoisella. Tyytyväisten käyttäjien prosenttiosuus 28 päivän jälkeen.

341126

N10100G40L06/0624